

Abformdesinfektion PLUS



UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE

Eigenschaften

- innerhalb von nur **1 Minute** wirksam! (zusätzliche TB Wirksamkeit nach 15 Min und Wirksamkeit gegen NORO-Viren nach 30 min.)
- enthält keine Aldehyde, Alkohole oder toxische Inhaltsstoffe -sicher im Gebrauch!
- angenehmer Geruch
- Zulassung als Medizinprodukt

Präparate-Typ

Gebrauchsfertige Lösung auf Basis von Ammoniumverbindungen.

Anwendungsbereiche

Zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien.

Anwendung

Die betreffende Abformung in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen.

Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginat- und Hydrokolloiden nur kurz eintauchen und Abtrocknen lassen.

Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen. Je nach Verschmutzungsgrad ist die Gebrauchslösung zu erneuern (RKI-Empfehlung: Mindestens arbeitstäglich). Die Gebrauchslösung kann über das Abwasser entsorgt werden.

Einwirkzeiten

Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 14561 (hohe Belastung)
Konz. 1min.

Candida albicans nach VAH, EN 13624, EN 14562 (hohe Belastung):
Konz. 1min.

Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV (mit Belastung):
Konz. 1min.

Zusammensetzung

In 100g sind enthalten:

0,24g Benzyl-C12-16-

alkyldimethylammoniumchlorid

0,24g N,N-Didecyl-N,N-

dimethylammoniumchlorid

0,24g C12-14-

Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

0,35g Chlorhexidingluconat

chemisch-physikalische Daten

Dichte: 1g/cm³

pH-Wert: 7,2

Artikelnummer Lieferformen

- REF 97-905 5 Liter
- REF 97-910 10 Liter

TbB (M. terrae im Suspensionstest, niedrige Belastung):

Konz. 15min.

Noro-Viren nach EN 14476 (niedrige Belastung):

Konz. 30min.

Rota-Viren nach BGA/DVV (niedrige Belastung):


Konz. 1min.

Sicherheitshinweise

H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Lagertemperaturbereich

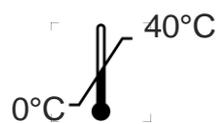

Lieferant

UNIGLOVES®

Arzt- & Klinikbedarf

Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71

D-53842 Troisdorf-Spich

☎ +49 (0) 2241-9323-0

✉ unigloves@unigloves.de